

# CARJA

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

**Nota: Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se acorda pentru o perioada determinate sau nedeterminata, in baza prescriptiei medicale eliberate de medical de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, direct sau prin reprezentantul legal.**

Dispozitivul medical **CARJA** face parte din clasa dispozitivelor de mers si este destinat persoanelor cu dizabilitati in scopul ajutorarii si remedierii deficientelor .

Dispozitivul medical **CARJA** , confectionat aluminiu, este usor manevrabil, nu este incomod putandu-se ajusta in functie de dimensiunea anatomica a utilizatorului.

Pentru realizarea acestui reglaj, se apasa cu doaua degete opritorii metalici pana cand tija de reglaj a carjei se elibereaza. Apoi se pozitioneaza la inaltimea dorita , dupa care se elibereaza opritorii metalici, tija de reglaj fixandu-se automat la inaltimea dorita.

Carja are in dotare un varf de cauciuc care impiedica alunecarea. Dupa utilizarea carjei o lunga perioada de timp, acest varf de cauciuc se poate uza. De aceea se recomanda verificarea periodica a gradului de uzura a acestui varf de cauciuc in vederea schimbarii acestuia cu unul nou.

Nu se recomnada utilizarea carjelor a caror varf de cauciuc este tocit, deoarece conduce la pierderea aderenței.

Pentru mersul pe suprafete alunecoase(polei, gheata, etc.) se recomnda folosirea unui varf metalic anti gheata.

### Mod de Intretinere

Se curata cu o carpa moale si umeda , dupa care se sterge cu o carpa uscata.

Nu folositi detergenti sau alte substante chimice pentru curatare.

Nu folositi materiale abrazive. Folosirea acestora poate conduce la deteriorarea aspectului exterior si al protectiei materialului din care este confectionat.