

BASTON ORTOPEDIC

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

Nota: Pentru utilizarea corecta a dispozitivelor medicale destinate persoanelor cu dizabilitati locomotorii, in vederea recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice cereti sfatul medicului ortoped sau kineto-terapeut.

Dispozitivul medical **BASTON ORTOPEDIC** face parte din clasa dispozitivelor de mers, este destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii, pentru a le facilita deplasarea.

Dispozitivul medical **BASTON ORTOPEDIC**, confectionat din aluminiu, este usor de utilizat, nu este incomod, putandu-se ajusta in functie de dimensiunea anatomica a utilizatorului.

Pentru realizarea acestui reglaj, se apasa cu doua degete opritorii metalici pana cand tija bastonului se elibereaza. Apoi se pozitioneaza la inaltimea dorita, dupa care se elibereaza opritorii metalici, bastonul fixandu-se automat la inaltimea dorita. Bastonul are un sistem de blocare dupa reglarea la inaltimea dorita. Functie de varianta constructiva acesta poate fi de forma unui colier cu un surub de fixare sau colier cu filet interior.

Bastonul are un pufer de cauciuc la partea inferioara. Puferul impiedica alunecarea bastonului si actioneaza si ca un amortizor de zgomot. Dupa utilizarea bastonului o perioada lunga de timp, aceste pufere de cauciuc se pot uza. De aceea se recomanda verificarea periodica a gradului de uzura a acestui pufer de cauciuc in vederea inlocuirii cu unul nou.

Nu se recomanda utilizarea bastonului cu puferul de cauciuc uzat sau lipsa, acest aspect conducand la pierderea aderenței, instabilitate

Reglajul corect al inaltimii bastonului

Modul de reglaj standard este urmatorul:

Pacientul sta in pozitie verticala, se asaza bastonul pe langa corpul acestuia, se regleaza inaltimea bastonului astfel incat manerul sa fie in dreptul incheieturii mainii pacientului.

Nu depasiti greutatea maxima de utilizare indicata de fabricant!

Mod de Intretinere

Se curata cu o carpa moale si umeda, dupa care se sterge cu o carpa uscata. Nu folositi detergenti sau alte substante chimice pentru curatare. Nu folositi materiale abrazive. Folosirea acestora poate conduce la deteriorarea aspectului exterior si al protectiei materialului din care este confectionat.