

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SE INTRETINERE

Nota: Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se acorda pentru o perioada determinate sau nedeterminata, in baza unei recomandari medicale eliberata de medicul de specialitate.

Inaltator vas WC - utilizat pentru pacientii cu dizabilitati locomotorii pentru a le asigura un sprijin eficient, pentru cei cu operatii de sold care nu pot flexa articulatia peste un anumit unghi. Inaltatorul are o forma anatomica, sprijin de brate solid, din duraluminiu, corpul este confectionat din polipropilena de culoare alba.

Montarea si demontarea se executa usor si rapid, fixarea se poate face pe orice vas de toaleta standardizat. Prinderea este sigura, se face prin intermediul unor falci si tampoane din cauciuc.

Inaltimea asigurata in raport cu vasul de toaleta este de 10 cm.

Greutate proprie inaltator – 2,2 kg

Greutate maxima utilizator – 114 kg

Mod de intretinere

Inaltatorul poate fi curatat folosind o solutie de sapun, sau un detergent usor, prin frecare cu o carpa moale sau un burete si clatire cu apa calduta. Se usuca inainte de montare utilizand o carpa absorbanta. Este o operatie importanta deoarece umiditatea excesiva poate duce la alunecarea pacientului de pe dispozitiv.