

# CADRU DE MERS

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

**Nota:** Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se acorda pentru o perioada determinate sau nedeterminata, in baza prescriptiei medicale eliberate de medical de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, direct sau prin reprezentantul legal.

Dispozitivul medical **CADRU DE MERS** face parte din clasa dispozitivelor de mers si este destinat persoanelor cu dizabilitati in scopul ajutorarii si remedierii deficientelor .

Dispozitivul medical **CADRU DE MERS** , este confectionat din aluminiu sau otel cromat, este usor manevrabil, nu este incomod putandu-se ajusta in functie de dimensiunea anatomica a utilizatorului.

Cadrul de mers are patru picioare , fiecare dintre ele putand fi ajustat pe inaltime. Pentru realizarea acestui reglaj, se apasa cu doaua degete opritorii metalici pana cand tija reglabila a piciorului se elibereaza. Apoi se pozitioneaza la inaltimea dorita , dupa care se elibereaza opritorii metalici, tija reglabila fixandu-se automat la inaltimea dorita. Aceasta operatiune se repeta pentru fiecare din cele patru picioare avanduse in vedere fixarea tijelor reglabile la aceeasi inaltime.

Cadrul de mers are in dotare 4 varfuri de cauciuc care impiedica alunecarea. Dupa utilizarea cadrului de o lunga perioada de timp, aceste varfuri de cauciuc se poat uza. De aceea se recomanda verificarea periodica a gradului de uzura a acestor varfuri de cauciuc in vederea schimbarii acestora cu unele noi.

Nu se recomnada utilizare cadrelor de mers a caror varfuri de cauciuc sunt tocite sau sunt tocite neuniform, deoarece conduce la pierderea aderenței.

### Mod de Intretinere

Se curata cu o carpa moale si umeda , dupa care se sterge cu o carpa uscata.

Nu folositi detergenti sau alte substante chimice pentru curatare.

Nu folositi materiale abrazive. Folosirea acestora poate conduce la deteriorarea aspectului exterior si al protectiei materialului din care este confectionat.