

BASTON ORTOPEDIC DIN LEMN

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

Nota: Pentru utilizarea corecta a dispozitivelor medicale destinate persoanelor cu dizabilitati locomotorii, in vederea recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice cereti sfatul medicului ortoped sau kineto-terapeut.

Dispozitivul medical **BASTON ORTOPEDIC DIN LEMN** face parte din clasa dispozitivelor de mers, este destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii, pentru a le facilita deplasarea.

Dispozitivul medical **BASTON ORTOPEDIC DIN LEMN**, confectionat din lemn de esenta tare, este usor de utilizat, este comod, putandu-se ajusta in functie de dimensiunea anatomica a utilizatorului.

Bastonul are un pufer de cauciuc la partea inferioara. Puferul impiedica alunecarea bastonului si actioneaza si ca un amortizor de zgomot. Dupa utilizarea bastonului o perioada lunga de timp, aceste pufer de cauciuc se pot uza. De aceea se recomanda verificarea periodica a gradului de uzura a acestui pufer de cauciuc in vederea inlocuirii cu unul nou.

Nu se recomanda utilizarea bastonului cu puferul de cauciuc uzat sau lipsa, acest aspect conducand la pierderea aderenței, instabilitate

Reglajul corect al inaltimii bastonului

Modul de reglaj standard este urmatorul:

Pacientul sta in pozitie verticala, se masoara distanta dintre incheietura utilizatorului si pardoseala, sa luam de exemplu o distanta de 82 de cm. Luam bastonul, scoatem puferul de cauciuc si masuram incepand de la maner o distanta de 82 cm. Trasam punctul si cu ajutorul unui fierastrau de lemn ajustam lungimea bastonului. Punem la loc puferul de cauciuc si verificam inaltimea bastonului, sprijinit pe podea acesta trebuie sa ajunga pana la incheietura utilizatorului. Va recomandam sa faceti aceasta operatie cu atentie deoarece bastonul daca este taiat la o lungime mica nu mai poate fi recuperat.

Nu depasiti greutatea maxima de utilizare indicata de fabricant!

Mod de Intretinere

Se curata cu o carpa moale si umeda , dupa care se sterge cu o carpa uscata. Nu folositi detergenti sau alte substante chimice pentru curatare. Nu folositi materiale abrazive. Folosirea acestora poate conduce la deteriorarea aspectului exterior si al protectiei materialului din care este confectionat.