

FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE MANUALA

Nota: Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se acorda pentru o perioada determinate sau nedeterminata, in baza prescriptiei medicale eliberate de medical de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, direct sau prin reprezentantul legal.

Fotoliul rulant cu antrenare manuala este destinat persoanelor cu afectiuni ale membrelor inferioare, pentru deplasarea acestora, atat in interiorul cladirilor cat si in exterior.

Deplierea caruciorului se face usor, fara bruscati, prin apasarea simultana a lateralelor suportului sezutului. Dupa depliere se rabateaza in plan orizontal cele doua pedale pentru sprijinul picioarelor si se regleaza bratul suportului de pedala in functie de necesitate (la variantele care au aceasta posibilitate). Asezarea utilizatorului in carucior se face numai cu rotile blocate cu ajutorul sistemului de franare. Bratele fotoliului sunt rabatabile usurand astfel asezarea sau ridicarea utilizatorului din scaun. Plierea se realizeaza numai prin tragere in sus a suportului de sezut pana la pliere. Inainte de aceasta operatie se demonteaza accesoriile existente (masa si suportul pentru cap) si se efectueaza pliarea pe verticala a pedalelor. Se interzice pliarea caruciorului prin presare laterala. Accesoriile, masa si suportul pentru cap (functie de model) se monteaza pe ghidajele existente in functie de necesitate. Ele se scot inainte de pliarea caruciorului. In cazul caruciorului pliant cu manete se poate regla cursa de actionare a manetei cu ajutorul rozetei plasate pe parghia de actionare.

Rotile trebuie umflate (daca sunt pneumatice) corect pentru a putea fi usor de actionat. Sarcina maxima pentru care este garantat caruciorul este de 120 kg. Fotoliul va fi ferit de umiditate excesiva (ploaie) si se utilizeaza de preferinta in incaperi si pe suprafete relativ netede (asfaltate, cimentate - nu pe pamant sau iarba). Caruciorul va fi ferit de lovituri si socuri mecanice. Nu se vor urca sau cobora borduri sau trepte cu caruciorul in sarcina. Se interzice folosirea caruciorului pentru transportul obiectelor. In cazul aparitiei unei defectiuni, se va inceta utilizarea caruciorului si acesta va fi adus la societatea noastra pentru remediere. Daca se constata ca s-a utilizat caruciorul dupa aparitia defectiunii, care a antrenat dupa sine deteriorarea si mai grava a produsului, conditiile de garantie se anuleaza. Garantia nu implica plata transportului pana la sediul societatii.

Mod de Intretinere

Se curata cu o carpa moale si umeda , dupa care se sterge cu o carpa uscata.

Nu folositi detergenti sau alte substante chimice pentru curatare.

Nu folositi materiale abrazive. Folosirea acestora poate conduce la deteriorarea aspectului exterior si al protectiei materialului din care este confectionat.

In situatia unei depozitari de durata, suprafetele nichelate se pot conserva prin aplicarea unui strat subtire de vaselina.